

Накладки для перераспределения давления

Инструкция по применению



Профилактическая подушка (накладка)

Применяется для перераспределения давления на различных областях тела, включая затылок, между коленями, под подбородком или в сложенном виде при контрактурах рук.



Подушка (накладка каблук) подпяточная

Доступна в двух размерах (стандартный и большой). Накладку можно использовать вдоль стопы, чтобы защитить подошву, или через пятку, чтобы защитить заднюю часть стопы. Эффективна также для защиты локтей.



Подушка (накладка) крестец

Подушка разработана для области крестца, но также может использоваться на других частях тела, таких как лодыжки или плечи.



Подушка (накладка) полоска


Для защиты точек давления на пальцах, на позвоночнике, для предотвращения повреждения от давления при использовании медицинских устройств (кислородные маски, трахеостомические трубки, жесткие воротники).



Новинка

Трубка профилактическая

Трубки идеально подходят для предотвращения повреждения тканей от давления при использовании медицинских приспособлений: назальных канюль, внутривенных катетеров. Легко крепятся в любом месте на трубках.

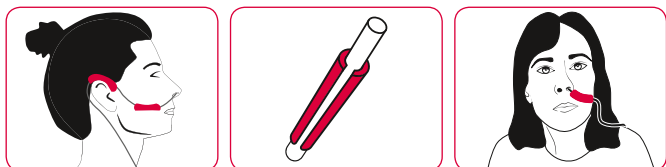



Простое применение



Выгодное решение



Многоразовое, можно мыть



Обрезка под нужный размер



Гибкое и мягкое в использовании



Прочное, долговечное



Эффективное применение



Удобно для пациента



| Наименование | Изображение | Артикул | Параметры | Упаковок в коробке | Штук в упаковке |
|---|-------------|------------|--|--------------------|-----------------|
| Подушка Fresco для снятия давления и профилактики пролежней из полимерного геля | | F-02601-01 | Лист 10×10×0,3 см | 5 | 1 |
| | | F-02601-02 | Лист 10×10×1,2 см | 5 | 1 |
| | | F-02602-01 | Лист 20×20×0,3 см | 2 | 1 |
| | | F-02602-02 | Лист 20×20×1,2 см | 2 | 1 |
| Подушка (накладка) полоска Fresco для снятия давления и профилактики пролежней из полимерного геля | | F-02603-01 | Отрез 30×5×0,3 см | 5 | 1 |
| | | F-02603-02 | Отрез 50×2,5×0,3 см | 5 | 1 |
| Подушка (накладка каблук) подпяточная Fresco для снятия давления и профилактики пролежней из полимерного геля | | F-02604-01 | Каблук стандартный | 2 | 1 |
| | | F-02604-02 | Каблук большого размера | 2 | 1 |
| Подушка (накладка) Fresco для снятия давления и профилактики пролежней из полимерного геля | | F-02605-00 | Накладка на крестец / лодыжку | 1 | 1 |
| Трубка Fresco для снятия давления и профилактики пролежней из полимерного геля | | F-02607-50 | Трубки для перераспределения давления 10×0,2 см × Ø 7 мм | 5 | 10 |

Fresco®



vsalon24.ru

■ **FRESCO INTERNATIONAL 2005, S.A.**
Poligon Can Volart
с/Torre de Cellers Nº 5, Naves 3 y 4
08150 Parets del Vallès
Barcelona, Spain
info@fresco.es | www.fresco.es

■ **Импортер в России: ИП Падолка С.Н.**
Юридический адрес: 644050, Россия, г. Омск,
Комбинатский переулок, 2 (подъезд 1), кв. 22
Фактический адрес: 644099, Россия, г. Омск,
ул. Гагарина 14, офис 4–5 (4 подъезд)
info@vsalon24.ru | www.vsalon24.ru
тел.: 8 800 551-51-54 | +7 381 220-81-02

CE

Rev. 01/2024